

Onderhoudsprotocol eindgebruiker New E-Move

Om te zorgen dat uw E-Move systeem in goede conditie blijft adviseren wij met klem om het onderhoudsprotocol te volgen.

Locatie	inspectiepunt	periode	controle door gebruiker
E-Move wielen	controle tijdens het rijden op schavende en/of ongewone geluiden	bij gebruik	x
	controle bandenspanning en slijtage en/of beschadiging aan buitenbanden en ventiel	3 wekelijks	x
	controle grijpvoepels op vastzitten en/of schade zoals krassen, deuken enz.	bij gebruik	x
	controle spaakspanning en visuele controle van spaken op beschadiging	maandelijks	x
	controle werking en speling quick release as	bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks	x
	controle op aanwezigheid van wielkap	bij gebruik	x
	controle van connectoren op beschadiging	bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks	x
	controle van bedrading op beschadiging	bij (de)montage wielen/ tenminste maandelijks	x
	controle op werking aan/uit en modeschakelaar	bij gebruik	x
accu en lader	controle "refresh" status accu	bij iedere lading/jaarijks	x
	controle op beschadigen van accu, lader en bekabeling acculader	bij gebruik	x
rolstoel	controle op aanwezigheid en juiste werking antitipsysteem	bij gebruik	x
	controle op beschadigen aan het antitipsysteem	wekelijks	x

Mocht u naar aanleiding van het onderhoudsprotocol afwijkende zaken vinden, neemt u dan direct contact met uw dealer op voor reparatie. Gebruik uw E-Move niet totdat deze is gerepareerd.