

## Technisch Bulletin

Nr. 190107-052

Januari, 2019

Uitgegeven door Mobility Products b.v.

### Onderwerp: E-Drive Plus kabel vervanging

De huidige kabels van de joystickcontroller en de begeleidersbedieningen worden verbeterd. De nieuwe kabels zijn makkelijker aan te sluiten dan de huidige kabels. De nieuwe kabels worden geleidelijk ingevoerd in de lente van 2019. Bijzonderheden:

- Het heeft een borgring om de verbinding te vergemakkelijken.
- Het is niet compatibel met de huidige connector.

Joystick controller



Begeleidersbediening



Huidige connector



Nieuwe connector



## Aansluitingsmethode met nieuw borgring

Verbind de pijltjes aan elkaar



## Ontgrendelingsmethode

1. Trek aan de borgring
2. Verwijder de connector met aangetrokken borgring





Onderdeel	Huidig artikelnummer	Nieuw artikelnummer
<b>A</b>	XOF-88146-00	XOF-88146-01
<b>B</b>	XOC-48321-00	XOC-48321-01
<b>C</b>	XOC-48381-00	XOC-48381-01
<b>D</b>	XOC-88146-00	XOC-88146-01
<b>E</b>	XOC-88147-00	XOC-88147-01